

NK3 - Cono Morse


● **Plataforma única**
● **100% COMPATIBLE**
● **CONO MORSE**

● **Diametro de rosca**
● **100% COMPATIBLE**
● **Ø1.8**

● **Microanillos**

- **Cuello invertido y microanillos** que mejoran el espacio y adaptación del tejido óseo.

● **Coronales**

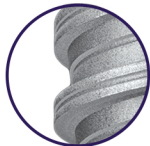


- **Cuadradas gruesas.**

● **Tratamiento de superficie**

- **Blastinado con partículas microscópicas.**
- **Doble tratamiento ácido.**
- **Superficie rugosa hasta la parte superior.**

● **Medias**

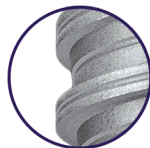

- **Cuadradas más delgadas.**

● **Fácil Inserción**

- **Autoroscante.**
- **Autoperforante**
- **Mayor estabilidad primaria.**


● **Apicales**



- **Rosca en V.**


● **Microranurado**

- **Mayor superficie de contacto.**

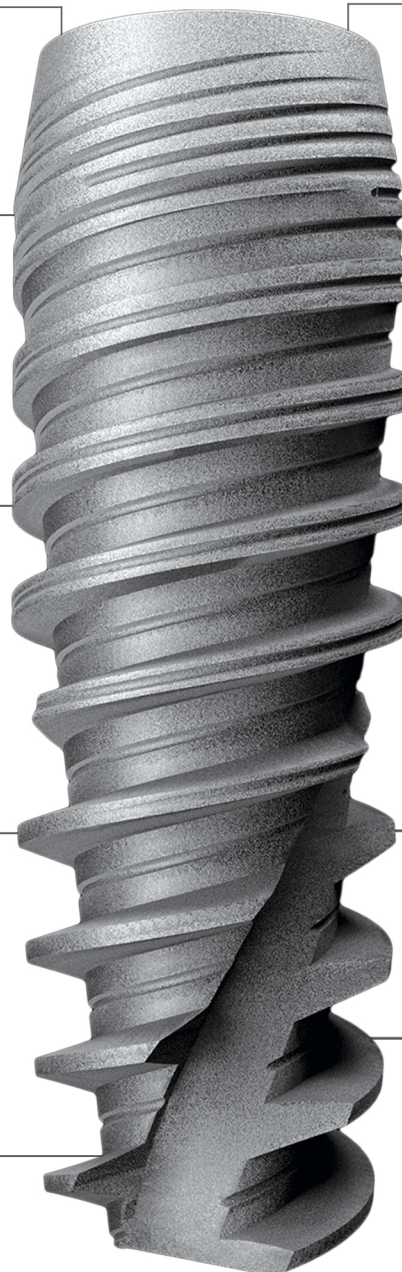

NK3 - Cono Morse

Diámetro	Código	Longitud	A B C D				Montador	Star Grip
			A	B	C	D		
Ø 3.3	NK3330085	8,5mm	∅ 3,7	∅ 2,55	∅ 1,55	∅ 2,5	✓	✓
	NK3330100	10mm	∅ 3,7	∅ 2,55	∅ 1,55	∅ 2,5	✓	✓
	NK3330115	11,5mm	∅ 3,7	∅ 2,55	∅ 1,55	∅ 2,5	✓	✓
	NK3330130	13mm	∅ 3,7	∅ 2,55	∅ 1,55	∅ 2,5	✓	✓
	NK3330150	15mm	∅ 3,7	∅ 2,55	∅ 1,55	∅ 2,5	✓	✓
Ø 3.75	NK3375085	8,5mm	∅ 3,85	∅ 2,9	∅ 2	∅ 2,5	✓	✓
	NK3375100	10mm	∅ 3,85	∅ 2,9	∅ 2	∅ 2,5	✓	✓
	NK3375115	11,5mm	∅ 3,85	∅ 2,9	∅ 2	∅ 2,5	✓	✓
	NK3375130	13mm	∅ 3,85	∅ 2,9	∅ 2	∅ 2,5	✓	✓
	NK3375150	15mm	∅ 3,85	∅ 2,9	∅ 2	∅ 2,5	✓	✓
Ø 4.2	NK3420085	8,5mm	∅ 4,2	∅ 3	∅ 2,1	∅ 2,5	✓	✓
	NK3420100	10mm	∅ 4,2	∅ 3	∅ 2,1	∅ 2,5	✓	✓
	NK3420115	11,5mm	∅ 4,2	∅ 3	∅ 2,1	∅ 2,5	✓	✓
	NK3420130	13mm	∅ 4,2	∅ 3	∅ 2,1	∅ 2,5	✓	✓
	NK3420150	15mm	∅ 4,2	∅ 3	∅ 2,1	∅ 2,5	✓	✓
Ø 5.0	NK3500085	8,5mm	∅ 4,95	∅ 3,3	∅ 2,6	∅ 2,5	✓	✓
	NK3500100	10mm	∅ 4,95	∅ 3,3	∅ 2,6	∅ 2,5	✓	✓
	NK3500115	11,5mm	∅ 4,95	∅ 3,3	∅ 2,6	∅ 2,5	✓	✓
	NK3500130	13mm	∅ 4,95	∅ 3,3	∅ 2,6	∅ 2,5	✓	✓
	NK3500150	15mm	∅ 4,95	∅ 3,3	∅ 2,6	∅ 2,5	✓	✓

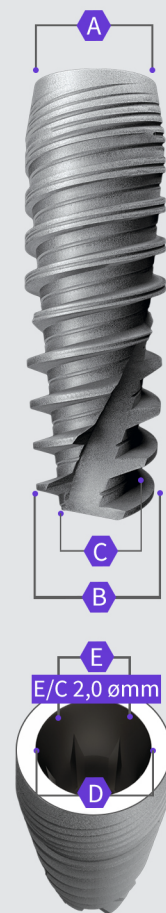

Protocolo de Fresado

En función del tipo de implante elegido, siga el protocolo de fresado que se recomienda a continuación. Para el éxito del implante, es imprescindible seguir una correcta instrumentación.

- Las fresas del sistema son para irrigación externa.
- Las fresas vienen con marcado láser de longitudes.
- Las fresas se venden SIN ESTERILIZAR - Esterilizar antes de usar.

¡IMPORTANTE! Respetar la ÚLTIMA FRESA INDICADA para cada clase de hueso y diámetro de implante.

Conexión Cono Morse - Fresado con Fresas Rectas

Diámetro de O FRESAS mm	Lanza 2;00*	2,2	2,5	2,80	3,00	3,15	3,30	3,50	3,80	4,30	4,50	4,80
Ø 3,30 mm	✓	✓	✓	✓ Clase IV			✓ Clase II-III	✓ Clase I				
Ø 3,75 mm	✓	✓	✓	✓	✓ Clase IV		✓	✓ Clase II-III	✓ Clase I			
Ø 4,20 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Clase II-III	✓ Clase I		
Ø 5,00 mm	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓ Clase IV	✓ Clase II-III	✓ Clase I