

NeoKings

soluciones en implantología

STI - SOFT TISSUE INTERNAL HEXÁGONO INTERNO


PLATAFORMA ÚNICA
100% COMPATIBLE

MICROANILLOS

- Cuerpo Cónico.
- Núcleo Cónico más pronunciado que las roscas.
- Condensante de hueso.

CORONALES

- Cuadradas Gruesas

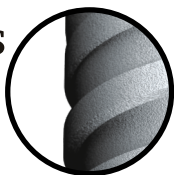

MEDIAS

- Cuadradas mas delgadas



APICALES

- Rosca en V



DIAMETRO DE ROSCA
100% COMPATIBLE


- Ø 1,72 mm

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE

- Blastinado con partículas microscópicas.
- Doble tratamiento ácido.
- Superficie rugosa hasta la parte superior.

FÁCIL INSERCIÓN

- Autorroscante
- Autoperforante
- Mayor estabilidad primaria

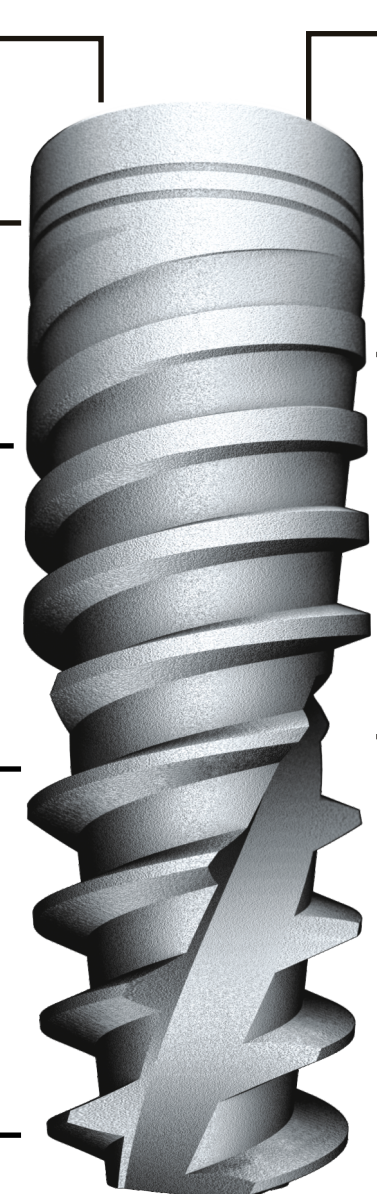


info@neokings.com.ar | www.neokings.com.ar |



/neokingsoficial

STI - HEXAGONO INTERNO

Diámetro	Código	Longitud	Dimensiones				Montador	Star Grip
			A	B	C	D		
Ø3.3	STI330085	8,5mm	Ø 3,7	Ø 2,55	Ø 1,55	Ø 3,5	✓	✓
	STI330100	10mm	Ø 3,7	Ø 2,55	Ø 1,55	Ø 3,5	✓	✓
	STI330115	11,5mm	Ø 3,7	Ø 2,55	Ø 1,55	Ø 3,5	✓	✓
	STI330130	13mm	Ø 3,7	Ø 2,55	Ø 1,55	Ø 3,5	✓	✓
	STI330150	15mm	Ø 3,7	Ø 2,55	Ø 1,55	Ø 3,5	✓	✓
Ø3.75	STI375085	8,5mm	Ø 3,85	Ø 2,9	Ø 2	Ø 3,5	✓	✓
	STI375100	10mm	Ø 3,85	Ø 2,9	Ø 2	Ø 3,5	✓	✓
	STI375115	11,5mm	Ø 3,85	Ø 2,9	Ø 2	Ø 3,5	✓	✓
	STI375130	13mm	Ø 3,85	Ø 2,9	Ø 2	Ø 3,5	✓	✓
	STI375150	15mm	Ø 3,85	Ø 2,9	Ø 2	Ø 3,5	✓	✓
Ø4.2	STI420085	8,5mm	Ø 4,2	Ø 3	Ø 2,1	Ø 3,85	✓	✓
	STI420105	10mm	Ø 4,2	Ø 3	Ø 2,1	Ø 3,85	✓	✓
	STI420115	11,5mm	Ø 4,2	Ø 3	Ø 2,1	Ø 3,85	✓	✓
	STI420130	13mm	Ø 4,2	Ø 3	Ø 2,1	Ø 3,85	✓	✓
	STI420150	15mm	Ø 4,2	Ø 3	Ø 2,1	Ø 3,85	✓	✓
Ø5.0	STI500085	8,5mm	Ø 4,95	Ø 3,3	Ø 2,6	Ø 3,85	✓	✓
	STI500100	10mm	Ø 4,95	Ø 3,3	Ø 2,6	Ø 3,85	✓	✓
	STI500115	11,5mm	Ø 4,95	Ø 3,3	Ø 2,6	Ø 3,85	✓	✓
	STI500130	13mm	Ø 4,95	Ø 3,3	Ø 2,6	Ø 3,85	✓	✓
	STI500150	15mm	Ø 4,95	Ø 3,3	Ø 2,6	Ø 3,85	✓	✓

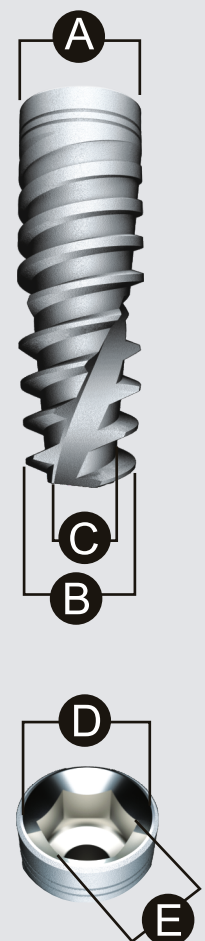

E/C 2,4 Ømm

Protocolo de Fresado

En función del tipo de implante elegido, siga el protocolo de fresado que se recomienda a continuación. Para el éxito del implante, es imprescindible seguir una correcta instrumentación.

- * Las fresas del sistema son para irrigación externa.
- * Las fresas vienen con marcado láser de longitudes.
- Las fresas se venden SIN ESTERILIZAR - Esterilizar antes de usar.

¡IMPORTANTE! Respetar la ÚLTIMA FRESA INDICADA para cada clase de hueso y diámetro de implante.

CONEXIÓN HEXÁGONO INTERNO FRESADO CON FRESAS RECTAS

Diámetro de O FRESAS mm	Lanza 2;00*	2,2	2,5	2,80	3,00	3,15	3,30	3,50	3,80	4,30	4,50	4,80
Ø 3,30 mm	✓	✓	✓	✓ Clase IV			✓ Clase II-III	✓ Clase I				
Ø 3,75 mm	✓	✓	✓	✓	✓ Clase IV		✓	✓ Clase II-III	✓ Clase I			
Ø 4,20 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Clase II-III	✓ Clase I		
Ø 5,00 mm	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓ Clase IV	✓ Clase II-III	✓ Clase I