

NeoKings


soluciones en implantología

MTE - MEDIUM TISSUE EXTERNAL HEXÁGONO EXTERNO



MTE - HEXÁGONO EXTERNO

Diámetro	Código	Longitud	Dimensiones				Montador	Star Grip
			A	B	C	D		
Ø3.3	MTE330100	10 mm	Ø 3.3	Ø 3.3	2.35	1.0	✓	X
	MTE330115	11.5 mm	Ø 3.3	Ø 3.3	2.35	1.0	✓	X
	MTE330130	13 mm	Ø 3.3	Ø 3.3	2.35	1.0	✓	X
	MTE330150	15 mm	Ø 3.3	Ø 3.3	2.35	1.0	✓	X
Ø3.75	MTE375070	7.0 mm	Ø 4,1	Ø 3.75	2.7	0.7	✓	✓
	MTE375085	8.5 mm	Ø 4,1	Ø 3.75	2.7	0.7	✓	✓
	MTE375100	10 mm	Ø 4,1	Ø 3.75	2.7	0.7	✓	✓
	MTE375115	11.5 mm	Ø 4,1	Ø 3.75	2.7	0.7	✓	✓
	MTE375130	13 mm	Ø 4,1	Ø 3.75	2.7	0.7	✓	✓
Ø4.0	MTE375150	15 mm	Ø 4,1	Ø 3.75	2.7	0.7	✓	✓
	MTE400070	7.0 mm	Ø 4.1	Ø 4.0	2.7	0.7	✓	✓
	MTE400085	8.5 mm	Ø 4.1	Ø 4.0	2.7	0.7	✓	✓
	MTE400100	10 mm	Ø 4.1	Ø 4.0	2.7	0.7	✓	✓
	MTE400115	11.5 mm	Ø 4.1	Ø 4.0	2.7	0.7	✓	✓
Ø5.0	MTE400130	13 mm	Ø 4.1	Ø 4.0	2.7	0.7	✓	✓
	MTE400150	15 mm	Ø 4.1	Ø 4.0	2.7	0.7	✓	✓
	MTE500060	6.0 mm	Ø 5.0	Ø 5.0	2.7	0.7	✓	✓
	MTE500080	8.0 mm	Ø 5.0	Ø 5.0	2.7	0.7	✓	✓
	MTE500100	10 mm	Ø 5.0	Ø 5.0	2.7	0.7	✓	✓
MTE500115	11.5 mm	Ø 5.0	Ø 5.0	2.7	0.7	✓	✓	
MTE500130	13 mm	Ø 5.0	Ø 5.0	2.7	0.7	✓	✓	
MTE500150	15 mm	Ø 5.0	Ø 5.0	2.7	0.7	✓	✓	

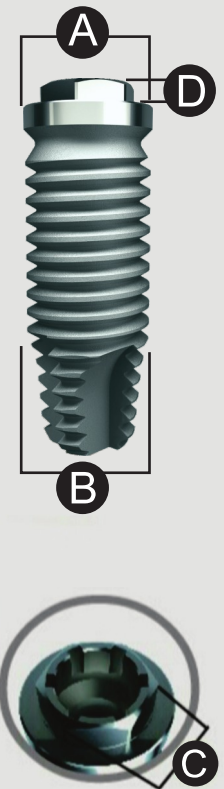

Protocolo de Fresado

En función del tipo de implante elegido, siga el protocolo de fresado que se recomienda a continuación. Para el éxito del implante, es imprescindible seguir una correcta instrumentación.

- * Las fresas del sistema son para irrigación externa.
- * Las fresas vienen con marcado láser de longitudes.
- Las fresas se venden SIN ESTERILIZAR - Esterilizar antes de usar.

¡IMPORTANTE! Respetar la ÚLTIMA FRESA INDICADA para cada clase de hueso y diámetro de implante.

CONEXIÓN HEXÁGONO EXTERNO IMPLANTES CILÍNDRICOS

Diámetro de O FRESAS mm	Lanza 2;00*	2,00	Piloto 2/3	2,80	3,00	3,15	3,30	3,50	3,80	4,30	4,50	4,80
Ø 3,30 mm	✓	✓		✓								
Ø 3,75 mm	✓	✓	✓		✓ Clase IV	✓ Clase II-III	✓ Clase I					
Ø 4,00 mm	✓	✓	✓		✓	✓ Clase IV	✓ Clase II-III	✓ Clase I				
Ø 5,00 mm	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓ Clase IV	✓ Clase II-III	✓ Clase I